

MUCAMBO®

Dial®

- ref: 101

QUALIDADE

LUVA CIRÚRGICA NÃO ESTERILIZADA – DIAL – REF. 101

Luva cirúrgica não esterilizada produzida à base de látex natural, lubrificada COM PÓ BIOABSORVÍVEL e formato anatômico. É recomendada para uso em procedimentos gerais em que haja a necessidade de um produto com características superiores às de luvas para procedimentos não cirúrgicos.

- ✓ Sensibilidade tátil e conforto garantidos;
- ✓ Boa resistência ao calçar;
- ✓ Punho devidamente identificado e dobrado de acordo com padrões hospitalares;
- ✓ Identificação de luva direita e esquerda na parte externa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Material:** látex natural;
- **Tamanhos:** 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 8,5;
- **Espessura média:** 0,21 mm;
- **Comprimento médio:** 28 cm;
- **Lubrificante:** pó bioabsorvível e inerte;
- **Esterilização:** não esterilizada;
- **Embalagem:** embalagem com 1 par; caixa com 250 pares;
- **Validade:** assegurada por 03 (três anos), equanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.

Para informações sobre desempenho e indicações de uso, fale conosco: www.mucambo.com.br

INSTRUÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

Fabricada por Mucambo S/A. – Registro no Ministério da Saúde sob o N° 10092410006 e Certificado de Autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego n° 3.709. Certificações complementares: B.P.F. – ISO 9001-2015 – CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ANVISA/INMETRO (RDC N°s 55/2011 – 94/2016) (PORTARIAS N°s 332/2012 – 451/2012 – 194/2018) – NBR-ISO 10282:2014.

Contém o tamanho, data de validade, lote, registro no Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Aprovação pelo Ministério do Trabalho, atendendo integralmente a Legislação Brasileira e Código de Defesa do Consumidor.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

1. Abrir o envelope (papel grau cirúrgico), com as pontas dos dedos;
2. Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
3. Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
4. Com ambas as mãos enluvadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva;
5. Este produto deve ser conservado em área arejada, protegido de luz solar, fonte de calor e umidade;
6. Produto de Uso Único – Destruir após o uso.